


SKU: UVCLD-TRI

UVC Dosímetros LED UVC

Los dosímetros LED UVC son indicadores fotocromáticos fáciles de usar que proporcionan la evidencia visible de una irradiación germicida exitosa con dispositivos UV-C que emiten longitudes de onda de 260-280 nm. **#VeaSuExito**

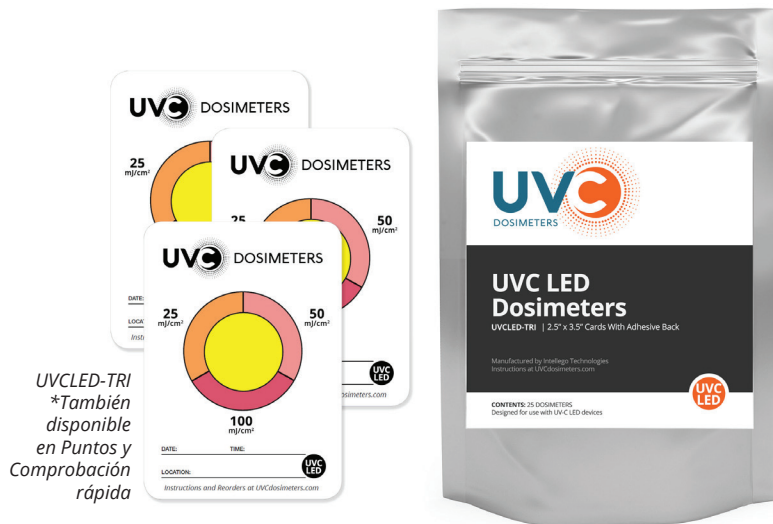

- ✓ Diseñado para usar con UV-C LED Dispositivos (260-280 nm)
- ✓ Disponible en tres estilos:
Tarjeta TRI (6,4 x 8,9 cm)
Comprobación rápida (5,1 cm²)
Puntos (2,54 cm)
- ✓ Fabricado en Suecia y validado por Research Instituto de Suecia (RISE)
- ✓ 25 unidades por bolsa
- ✓ Embalaje de mylar resellable (11,4 x 15,9 cm)
- ✓ MOQ 200 unidades
- ✓ De un solo uso
- ✓ Vida útil de 3 años
- ✓ Etiqueta privada y personalizada disponible

Instrucciones de uso

- 1 Retire el adhesivo del respaldo y coloque el Dosímetro UVC LED sobre o adyacente a cualquier superficie o equipo que será desinfectado con UV-C. El indicador amarillo debe estar de cara a la fuente de luz e inicie el ciclo de desinfección.
- 2 Una vez que el ciclo se ha completado, haga la lectura de la exposición de inmediatamente o dentro de las siguientes 24 horas para obtener resultados óptimos.
- 3 Para conservar un historial, haga anotaciones directamente en el dosímetro para indicar los resultados. Usted puede conservar o desechar los dosímetros de acuerdo con requisitos de lugar.

Si desea realizar una orden o solicitar una cotización, visite UVCdosimeters.com o al email info@intellego-technologies.com



INTELLEGO
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY SAVING LIFE AND MONEY

En línea: UVCdosimeters.com
En línea: Intellego-Technologies.com
Correo electrónico: info@intellego-technologies.com